

CAIRE®

携帯型酸素濃縮装置

製造販売認証番号:226ADBZX00219000
医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器
販売名:ケアサンソ Eclipse

ケアサンソ [エクリプス] Eclipse

“Quality of Life”

Eclipseは患者様の
QOL向上を応援します。



ご自宅でも外出時でも1台で対応可能。
国内外への旅行にも対応。

最大連続酸素流量 **3L / 分**

※連続モード・0.5-3.0L/分の6段階

autoSAT® 機能搭載

呼吸に合わせて適切な量の酸素を供給する機能。



航空機内での使用も可能です。

※事前に航空会社に申請が必要です。航空会社に問合せ下さい。

携帯型酸素濃縮装置

[エクリプス]

autoSAT®
機能搭載

ケアサンソ Eclipse



トランスポートブル酸素濃縮装置の ワールド・スタンダード

世界で最も実績のあるトランスポートブル型酸素濃縮装置です。

■仕様

酸素濃度	88%以上
流量設定 連続	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0L/分 (6段階)
流量設定 同調	16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 128, 160, 192 (14段階)
吸気感度	3段階 (高、中、低)
寸法	310(W)×180(D)×490(H)mm
重量	8.35kg (バッテリー含む)
電源	AC100-240V 50/60Hz DC12V バッテリー (リチウムイオン)
最大消費電力	145Watt
使用可能標高	0-4,000m

■標準付属品



■オプション



■バッテリー使用時間 (目安)

連続モード	流量設定	1L/分	2L/分	3L/分
	使用時間	約3時間42分	約2時間	約1時間18分
同調モード	流量設定	16mL/回 (1L/分相当)	48mL/回 (3L/分相当)	96mL/回 (6L/分相当)
	使用時間	約5時間24分	約4時間54分	約3時間30分

※バッテリー使用可能時間は使用される環境、呼吸回数により異なります。上記の数値は目安です。


主な特徴 3L/分連続流量とautoSAT® (世界初)の機能

autoSAT®は患者様の呼吸の状態を検知し、呼吸のタイミングに合わせて適切な量の酸素を供給する新しい機能です。

- 吸気を検知できない場合 (トリガー不検知) 自動的に連続供給モードに切り替わります。
- 労作時は呼吸回数を常時モニターすることによりもっとも適切な状態で酸素を供給します。
- 吸気能力に合わせたトリガー感度 (3段階) と酸素吐出パターン (3段階) を設定することができます。
- 在宅での据置型酸素濃縮装置として連続フロー3L/分 (最大) として使用できます。
- 連続流とautoSAT®への切り替えがいつでも自由に選択できます。
- 小型・軽量設計により居室内での装置の移動が容易にできるため、わずらわしい延長チューブから解放されます。



autoSAT®モードと通常同調式装置の比較

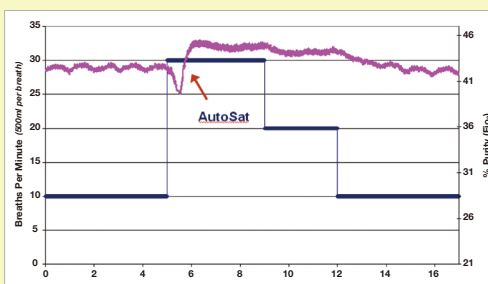

- ・仕様は改良のため、予告なしに変更となることがございます。
- ・ご使用に際しては、必ず添付文書及び製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

一般的名称: 酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ
製造販売認証番号: 226ADBZX00219000
医療機器分類: 管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売元

ケアメディカルジャパン株式会社

愛知県安城市三河安城本町2-7-13
Tel: 0566-91-1670 Fax: 0566-91-1675

製造元 CAIRE Inc. (ケアインク) アメリカ合衆国

2025-02CS-IV1000

問合せ先